



MEDICINSK KOMPRESSIONSSTRØMPE

***Sahva*fit[®]**
Professionelle kompressionsstrømper



Kvalitet

Sahvafit® medicinske kompressionsstrømper er fremstillet i henhold til nyeste viden og teknologi indenfor medicin- og tekstilindustrien.

Sahvafit® stiller høje krav til kvalitet. Derfor kontrollerer vi løbende både produktion og kvalitet, ligesom strømperne desuden kontrolleres af det uafhængige Hohenstein institut i Tyskland.

Alle Sahvafit® kompressionsstrømper lever således op til den internationale anerkendte RAL-standard (kvalitetscertificering) for medicinske kompressionsstrømper.

Holdbarhed

Alle RAL-godkendte kompressionsstrømper har en holdbarhed på 6 måneder, efter de er taget i brug.

Derved sikres brugerens helbred optimalt og kompressionsstrømpernes rette effekt.

Herefter bortskaffes kompressionsstrømperne i almindeligt blandet affald. Genbrug af andres medicinske kompressionsstrømper, kan i værste fald være helbredsskadelig.



Materialer

For at sikre optimal funktion har Sahvafit® udviklet tre varianter af kompressionsstrømper. Hver variant er designet for at afhjælpe brugeren optimalt i forhold til behovet.

Sahvafit® medicinske kompressionsstrømper indeholder varierende mængder af:

- Bomuld
- Lycra® (Elastan)
- Tactel® (Polyamid)
- Nylon (Polyamid)
- SeaCell® active



Miljø

Kompressionsstrømperne indeholder økologiske fibre (godkendt iht. Øko-Tex® Standard 100). Emballagen er designet til at være så CO2 neutralt som muligt.

100% kvalitetsgaranti


Sahvafit® kompressionsstrømperne kontrolleres omhyggeligt, før de afsendes fra producenten.

Hvis der, ved korrekt brug og pleje, alligevel skulle vise sig fejl i materialet indenfor 6 måneder, ombyttes kompressionsstrømperne uden beregning.

Returner de defekte Sahvafit® strømper, sammen med kvitteringen, til den afdeling i Sahva, hvor du har fået strømperne udleveret.



Beige

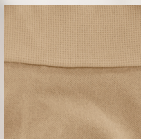

Materiale

49 % Bomuld
27 % Nylon Polyamid
24 % Lycra® Elastan

Sahvafit® Bomuld

Sahvafit® Bomuld er kendetegnet ved et højt indhold af naturlige fibre (49 % bomuld), som gør strømpen meget hudvenlig.

Bomuldsstrømpen er velegnet til langtidsbrugere af kompressionsstrømper, som også har et højt aktivitetsniveau.


Sahvafit® Elegant

Sahvafit® Elegant er en diskret og meget elastisk kompressionsstrømpe, der er let at tage på. Indholdet af Tactel® har en svedtransporterende effekt, som modvirker, at huden bliver fugtig, ved at transportere fugten fra huden ud gennem kompressionsstrømpen.



Mexico

Sort

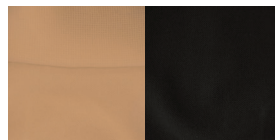

Materiale

71 % Tactel® Polyamid

29 % Lycra® Elastan


Sahvafit® Fast

Sahvafit® Fast er en meget "stiv" og slidstærk kompressionsstrømpe, som er velegnet til folk med højt aktivitetsniveau. Kompressionsstrømpen indeholder SeaCell® og sølvioner, som gør kompressionsstrømpen både antibakteriel og fungicid. Derfor er den særdeles hudvenlig og lindrer indikationer/lidelser som dermatitis, neurodermatitis, psoriasis og kløe.



Beige

Sort

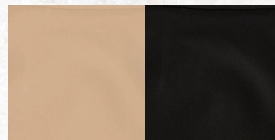

Materiale

- 62 % Tactel® Polyamid
- 26 % Lycra® Elastan
- 8 % Bomuld
- 4 % SeaCell® active

Bevilling af kompressionsstrømper

Hvis din læge vurderer, at din lidelse er kronisk og derfor ordinerer kompressionsstrømper, kan du søge om bevilling af strømperne hos kommunen. Normalt vil du få bevilget to par strømper om året.

Når du har modtaget bevillingen fra kommunen, tager du den med til Sahva, som udleverer strømperne til dig.

Frit valg af leverandør

Ifølge §112 i Serviceloven kan man frit vælge sin leverandør af hjælpemidler, uanset hvem kommunen i øvrigt har en aftale med. Det betyder med andre ord, at hvis der på din bevilling bliver henvist til en anden leverandør af kompressionsstrømper, end den, du gerne vil benytte, kan du frit vælge at opsøge en anden.

Ved skift af leverandør kan der forekomme en (mindre) egenbetaling.





Standard eller specialfremstillet

Kompressionsstrømper fra Sahvafit® bliver enten valgt ud fra et standardsortiment eller fremstillet efter dine mål. Dine strømper er under alle omstændigheder helt personlige, og må derfor ikke benyttes af andre end dig.

Brug dem hver dag

For at opnå maksimal effekt af strømperne er det vigtigt at de anvendes hver dag og kun tages af om natten. Følg altid lægens anvisninger angående brugen.



Påtagning

Det er vigtigt, at strømperne tages på om morgenen, inden benene begynder at hæve. Huden skal være tør. Brug altid gummihandsker - både når du tager strømperne på og af. Det beskytter strømperne, og gør på- og aftagningen meget lettere.

Rengøring

Kompressionsstrømperne kan maskinvaskes ved 40°C og må ikke tørretumbles. Kompressionsstrømperne skal vaskes regelmæssigt eller når de er blevet snavsede. Anvend et mildt finvaskemiddel uden enzymer. Anvend ikke skyllemiddel. Strømperne må ikke tørres i direkte sollys eller på radiator.

Sahva forhandler også vaskemiddel, som er specielt velegnet til vask af kompressionsstrømper.



RING TIL SAHVA
7011 0711

Butik – med sko, kompressionsstrømper, såler, bandager, brystproteser og linge.

Klinik – mål til fodindlæg, håndsytet fodtøj, sko, proteser, ortoser og kompressionsstrømper.

For tidsbestilling kontakt os på telefon 7011 0711

4016-01.08.14

Sahva
Et liv i bevægelse

www.sahva.dk · Telefon 7011 0711