


Brugervejledning

BOB-korset

■ Dato for udlevering: _____

Sahva

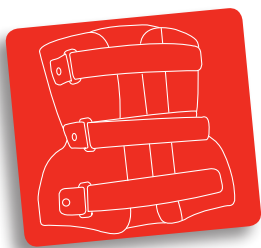

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye korset, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af korsettet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Korsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Dit korset er et hjælpemiddel, der har til formål at aflaste ryggen for u hensigtsmæssige belastninger. Det er derfor vigtigt, at du strammer korsettet godt til, da aflastningen bl.a. sker ved at øge trykket i bughulen.

› Indikation

Bruges til immobilisering af rygskelettet. Kan anvendes præ- og postoperativt. Anvendes ofte en periode for at vurdere, om en evt. stivgørende

operation vil være effektiv. Kan anvendes til behandling af kroniske eller tilfældige lænderygsmerter, osteoporose, spondylolistese, frakturer og spinal stenose.

› Materialer

Dit korset er lavet af et termoplastisk materiale; ofte med lufthuller i. Korsettet åbnes foran, og spændes med tre – fem velcrostrøpper.

› Behandlingstid for midlertidige hjælpemidler

Efter lægens anvisninger.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning

Korsettet kan tages på enten stående eller liggende. Start med at spænde det midterste velcro-bånd, hvorefter de andre spændes. Det kan være nødvendigt at efterspænde alle velcrostrøpper.

› Aftagning

Korsettet kan tages af enten stående eller liggende. Start igen med at løsne det midterste velcro-bånd, hvorefter de andre løsnes langsomt.

› Pleje af huden

Huden skal vaskes dagligt, da du sveder mere med korset end uden. Brug altid en undertrøje eller T-shirt under korsettet. Ved brug af creme på kroppen, er det vigtigt, at cremen er trængt helt ind i huden, inden korsettet tages på.

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen.

Alt sammen kan være med til at ændre korsettets pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

