


Brugervejledning

Denis Browne (DB) hofteortose

■ Dato for udlevering: _____

Sahva

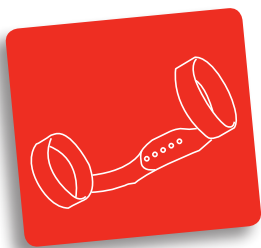

Indledning

Denne pjeces er en skriftlig vejledning om dit barns nye hofteortose, som barnet har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af hofteortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem.

Hofteortosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Ved behandlingen anlægges en såkaldt Denis Browne (DB) ortose. Den har til formål at holde ledhovedet på plads i ledskålen. Ortosen anlægges af en bandagist, og må kun fjernes af læge eller bandagist. Skinnen består af to plastikringe, som omslutter lårene. Ringene holdes sammen af en metalskinne bag barnets ryg. Plastringene passer løst om lårene. Der skal lige være plads til, at man kan få en finger ind mellem låret og skinnen. Der må ikke være tryk mod knæhaserne. Skinnen holdes på plads af en elastikstrop rundt om barnets

mave. Ringene er polstret med filt for at undgå tryk i knæhaserne, og bleen sikrer, der ikke bliver tryk på ryggen.

› Indikation

Nogle børn fødes med en slap hofteledkapsel eller en dårligt udviklet hofteskål. Begge dele kan føre til, at hoften går af led. Medfødt hofteskred ses langt hyppigst hos piger, og hyppigere hvis barnet er født i sædestilling. Arv spiller også en rolle.

› Behandlingstid for midlertidige produkter

Ved det første besøg i Ortopædkirurgisk Ambulatorium vil dit barn få en Denis Browne ortose på. Barnet skal have ortosen på hele døgnet i tolv uger. Ortosen holder barnets ben i "frøstilling", hvorved barnets hofteled bliver holdt på plads. Dette stimulerer hofteskålen til at blive normalt færdigudviklet.

Brug af produktet

› Påtagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Aftagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Pleje af huden

Du bør ikke bruge pudder, da det sætter sig i hudfolderne. Hvis der kommer rødme af huden nogen steder, kan du smøre med vandafvisende creme – for eksempel Zinksalve eller Silkosal. Når barnet skal bades eller have skiftet ble, må elastikstroppe- ngerne fjernes, og metalskinnen kan drejes om på barnets forside. Skinnen tåler vand. Man kan således bade sit barn - ligesom babysvømning også kan lade sig gøre. Polstringen fjernes, og der lægges i stedet en vaskeklud under både skinne og elastik for at beskytte huden mod tryk. Efter badet skal barnet og skinnen aftørres grundigt, og almindelig hudpleje foretages.

› Forandring af kroppen

Efterhånden som barnet vokser, vil skinnen blive skiftet til korrekt størrelse ved kontrollerne. Vi opfordrer dig til at kontakte Sahva eller hospitalet hurtigst muligt, hvis der er tegn på gener, eller hvis du vurderer, hofteortosens pasform er forrin-

