



Brugervejledning

Kosmetisk/æstetisk armprotese

■ Dato for udlevering: _____

Sahva



Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye kosmetiske/æstetiske armprotese, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af protesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Armprotesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Den kosmetiske/æstetiske armprotese har en passiv hånd, der er meget naturtro af den anden side. Funktionelt udgør den en opposition til den anden side og gør det muligt at holde ting, som for eksempel en bog eller pung. Desuden opnås en ligevægt i overkroppen ved brug af protesen. Den kosmetiske/æstetiske armprotese kan være med til at fjerne fokus fra den manglede legemsdel, ligesom det er

muligt at anvende neglelak på fingrene af protesehånden.

› Indikation

Hvor der ønskes en naturtro kopi af den anden side, og hvor æstetikken har større vægt end håndens åbne/lukke funktion. For eksempel i situationer hvor man ikke ønsker at blive konfronteret med det at mangle en legemsdel.

› Materialer

Lamineret hylster, silikone-hånd, EVA skum, silikone sleeve (kunstig hud) og evt. silikone liner samt pinlås til fastgørelse af protese.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder. Levetiden på protesen er afhængig af de arbejdsituationer, den udsættes for.

Brug af produktet

› Påtagning

Er der tale om underarmsprotese skubbes stumpe forsigtigt ned i hylsteret. Vær omhyggelig med at få bløddelene omkring albuen til at sidde korrekt. Ved overarmsprotese anvendes evt. en silikone-liner, der rulles på, og låsepind klikkes ned i låsen i hylsteret.

› Aftagning

Ved underarmsprotese trækkes bløddelene forsigtigt op over hylsterkanten, og armen trækkes forsigtigt ud af hylsteret. Overarmsproteser trækkes af ved at udløse låsen på indersiden af protesen.

› Pleje af huden

Huden plejes med hudvenlig lotion uden allergiske stoffer. Hvis der anvendes liner til at fastholde protesen, er det vigtigt, at denne vaskes dagligt i mild sæbe uden farvestof og allergifremkaldende stoffer. Husk at skylle grundigt for at få sæberester ud. Det er vigtigt, at der ikke opstår røde mærker på stumpe, som ikke aftager tyve minutter efter,

