


Brugervejledning

Lyskebrok

■ Dato for udlevering: _____

Sahva

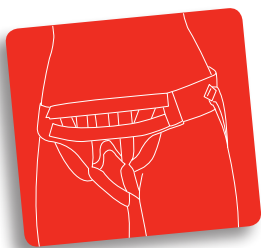

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din lyskebrok ortose, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af lyskebrok ortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Ortosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Anvendes som støttende ortose. Kan også anvendes til at holde brokket inde på plads, så man undgår afklemning af brokket.

› Indikation

Anvendes ved lyskebrok (inguinalhernie). For eksempel før operation eller hvor operation ikke er mulig. Hos mænd kan brokken undertiden nå helt ned i pungen (scrotum). Hertil kan man få et suspensorium som støtter pungen, så den ikke føles tung.

› Materialer

Findes til højre eller venstre side eller dobbelt, hvis der er brok i begge sider. Den består af en pude, som holdes inde på brokket, og en rem som sidder rundt om hofterne. Der er en lårrem, som holder puden og brokbindet godt på plads.

› Behandlingstid for midlertidige produkter

Efter lægens anvisninger.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt.

Brug af produktet

› Påtagning

Ortosen kan tages på enten liggende eller stående. Når man ligger ned, falder brokket som regel på plads, hvorved det er lettere at stramme ortosen til, så man undgår afklemning af brokket. Hofteremmen lukkes først, hvorefter lårremmen lukkes. Skal sidde så stramt, at brokket bliver holdt på plads.

› Aftagning

Løs forsigtigt lårremmen først, hvorefter hofteremmen løsnes. Tag derefter ortosen af.

› Pleje af huden

Huden vaskes dagligt med uparfumeret, mild sæbe.


› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen.

Alt sammen kan være med til at ændre ortosens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

› Særlige risici

Risikoen ved at have lyskebrok er, at en mindre del af tarmen kan afklemmes i brokket således, at der opstår et indeklemt brok. Sørg for at hele brokket er på plads, inden ortosen strammes til.

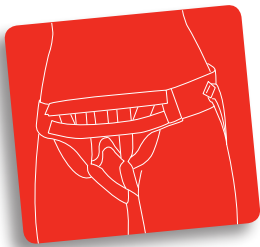

› Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn

til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› Rengøring

Ortosen kan vaskes i håndvarmt vand med mild uparfumeret sæbe og tørres på et håndklæde nat-ten over.

› Bortskaffelse/returnering

Når ortosen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

› Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabriktionsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Series of horizontal lines for writing notes.