


# Brugervejledning

Mekanisk konventionel armprotese

■ Dato for udlevering: \_\_\_\_\_

# Sahva

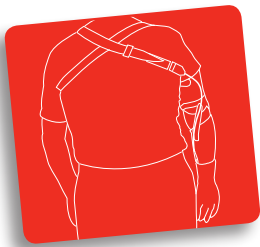

## Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye konventionelle armprotese, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af armprotesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Armprotesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

## Beskrivelse af produkt

### › Funktion

Ved den konventionelle armprotese er hånden, og evt. albueleddet, styret af kabeltræk og seletøj. Hånd eller krog kan således præcist positioneres afhængig af trækket i seletøjet.

### › Indikation

I situationer hvor der ønskes en driftsikker og holdbar protese.

### › Materialer

Lamineret hylster evt. med silikonedel. Hånd i letmetal med kabeltræk med yderhandske i pvc eller silikone evt. krog i metal. Seletøj fremstillet af metalkabel, nylonjord og læder. Evt. silikoneliner til fastgørelse af protese ved hjælp af pinlås.

### › Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Holdbarheden er afhængig af arbejdsituationer og almindelig slitage af protesen. Ved konventionelle proteser er der en stor holdbarhed, hvor det oftest er seletøj, kabler og handske, der udskiftes på grund af slitage og hygiejne.

## Brug af produktet

### › Påtagning

Stumpen føres forsigtigt ned i hylsteret, og bløddelene "sættes" ordentligt, så slitage på huden undgås. Seletøjet sættes på arm og skulder, og spændes i velcro eller spændestykket.

### › Aftagning

Seletøjet tages først af, hvorefter stumpen forsigtigt trækkes op af hylsteret. Bløddelene trækkes forsigtigt op over hylsterkanten.

### › Pleje af huden

Huden plejes med hudvenlig lotion uden allergiske stoffer. Hvis der anvendes liner til at fastholde protesen, er det vigtigt, at denne vaskes hver dag i mild sæbe uden farve og allergifremkaldende stoffer. Husk at skylle grundigt for at få sæberester ud. Hvis der opstår røde mærker på stumpen, som ikke er forsvundet tyve minutter efter, protesen er taget af, skal Sahva kontaktes.

### › Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre armprotesens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

