


Brugervejledning

Ortose til behandling af klumpfod
Ponsetti ortose

■ Dato for udlevering: _____

Sahva

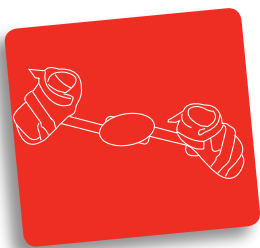

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om den nye Ponsetti ortose, som dit barn har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af ortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem.

Ponsetti ortosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Ponsetti ortosen korrigerer foden efter gipsbehandling. Ortosens sko holdes i den korrekte position via kliklåse, og forhindrer på den måde en fejlstilling af foden.

› Indikation

Ponsetti ortosen bruges til børn med klumpfod (pes equino varus). Den holder foden neutralstillet, hindrer spidsfodsstilling i bagfoden og sørger for at foden ikke drejer indad.

› Materialer

Ortosens skinne er fremstillet i plast og metal. Skoene er i læder.

› Behandlingstid for midlertidige produkter

Efter lægens anvisninger.

Ellers er behandlingstiden indtil 4-års alderen:

0-3 mdr.: 23 timer i døgnet.

3-6 mdr.: Min. 16 timer i døgnet.

Efter 1 år: 12-14 timer i døgnet.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Da det er barnets vækst, der afgør, hvornår produktet skal skiftes ud, kan der ikke opstilles faste intervaller for udskiftning. Ortoser af denne type når sjældent at blive slidt op, men bliver skiftet ud, fordi barnet vokser. Ved de løbende kontroltider, vil der blive holdt øje med, om der er behov for en ny størrelse.

Brug af produktet

› Påtagning

Skoene anvendes altid sammen med strømpe, da det er med til at hindre friktion og hudproblemer. Åbn alle lukninger på skoen. Sæt foden ind, så hælen er helt tilbage og nede (brug inspektionsvindue). Dette er vigtigt for at skoen sidder korrekt. Luk først midterste rem og spænd denne, så hælen holdes i korrekt position. Træk i strømperne foroven og ved tåspidsen for at hindre folder og luk dernæst de sidste remme. For at gøre skinnen fast til skoene, skal kliklåsen sættes ind mod plastbeslaget i skoen, og skinnen skubbes hen mod hælen, indtil holderen tager fat.


› Aftagning

Kliklåsen udløses på undersiden af skoen, og de kan herefter tages af.

› Pleje af huden

Undgå folder i strømperne så der ikke opstår hudproblemer. Røde mærker på huden skal være forsvundet efter 20 – 30 minutter. Er de ikke det, skal du kontakte bandagisten. Det er vigtigt at sørge for, at foden sidder godt fast i skoen, da der kan opstå friktionsgener, hvis foden glider frem og tilbage.

Hvis der opstår blærer, kontaktes bandagisten.

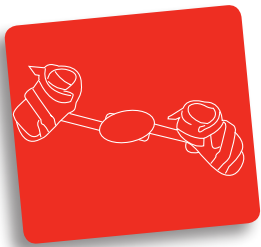

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten man er barn eller voksen, og pasformen på ortosen kan derfor ændre sig. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis der er tegn på gener, eller hvis du vurderer, at ortosens pasform er dårlig.

› Særlige risici

Det frarådes at gå på ortosen, da materialet er glat. Du skal kigge efter røde mærker hver dag, dér hvor ortosens sko sidder, og kontakte bandagisten ved de mindste tegn på tryk.

› Allergi

Er du bekendt med et stof, barnet er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til dette ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› Rengøring og vedligeholdelse

Skind er et naturmateriale, som er rart at have mod huden. Men det suger fugt, så du må ikke vaske skindet under vand. Brug i stedet en let fugtig klud til at tørre skindet af. Det er vigtigt, at skindet får lov at lufttørre. Der må derfor ikke bruges for eksempel hårtørrer, radiator mv. til at tørre ortosens skinne og sko. Plast kan tåle vand og sæbe, men en klud med husholdningssprit kan også bruges som rengøringsmiddel.

› Vedligeholdelse

Metaldele under skoen kan ved behov smøres med lidt olie.

› Bortskaffelse/returnering

Når ortosen ikke længere passer eller er slidt op, kan det afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

› Ansøgningsregler

Ortosen er som regel et behandlingshjælpemiddel, som er betalt af hospitalet. Der skal derfor ikke søges ved kommunen ved reparationer eller fornyelser. Hvis hjælpemidlet trænger til udskiftning

eller reparation kontakter du blot Sahva. Sahva kontakter hospitalet med henblik på ordination til nyt hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabriktionsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.
