


Brugervejledning

Scapula Alata ortose

■ Dato for udlevering: _____

Sahva

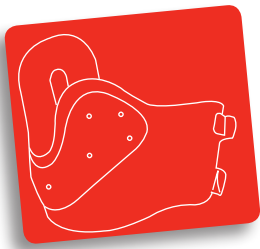

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye scapula alata ortose, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af ortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Ortosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Scapula betyder skulderblad, og Alata betyder vingende. På dansk kaldes denne tilstand "englevinge". Formålet med behandling med ortose er, at holde det vingende skulderblad inde på plads for at muliggøre genoptræning af den svækkede muskulatur.

Ortosen er udformet så den omslutter brystkassen med en plastskaal, som lukkes med to velcrobånd. Denne forstærkes med en bøjle i enten kulfiber eller stål omkring den implicerede side med hold

bagpå skulderbladet og modhold foran under kravebenet.

› Indikation

Målgruppen for behandling med en ortose er patienter med et vingende skulderblad (scapula alata).

En scapula alata opstår som følge af en markant svækkelse, af de muskler, der styrer skulderbladet. Alt efter hvilke muskler der er påvirket, udmønter det sig ved at skulderbladet vinkler i forskellige retninger, med gener/problemer til følge.

I nogle tilfælde opstår en scapula alata spontant uden nogen kendt ydre påvirkning, i andre tilfælde er det en ulykke eller virus, der er årsagen.

Ortosen skal altid ordineres af en læge, og det er den ordinerende læges beslutning i hvilke tilfælde, en behandling med ortose skønnes gavnlige; dette være sig også i tilfælde af anden diagnose end Scapula Alata.

› Materialer

- Korset i termoplast.
- Ramme i kulfiber eller stål.
- Nitter i kobber og stål.
- Puder og pelotte i skumplast.
- Underfald i skumplast overtrukket med skind.
- Velcrobånd.

Ortosen bliver fremstillet individuelt over en gipskopi af din brystkasse/ryg.

› Behandlingstid for midlertidige hjælpemidler

Efter lægens anvisninger.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning

Inden påtagning af ortosen, anbefaler vi, du ifører dig en stramtsiddende T-shirt eller undertrøje, da

