




Brugervejledning

SdO - Skulderortose
(*Shoulder Ortose*)

■ Dato for udlevering: _____

Sahva

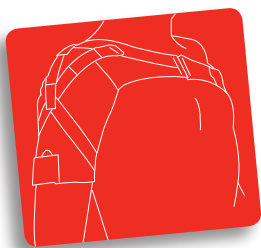

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye skulderortose, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af skulderortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Skulderortosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen.

Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Skulderortosen skal stabilisere, smertelindre, immobilisere og aflaste efter operation og eventuelt korrigerer fejlstillinger i skulderen

› Indikation

Skulderortosen anvendes til gigt- og neuromuskulære sygdomme samt efter brud og traume.

› Materialer

Skulderortosen kan være fremstillet i tekstil, plast, silikone eller en kombination af disse.

› Behandlingstid for midlertidige hjælpemidler

Efter lægens anvisninger.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til omkring seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Aftagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Pleje af huden

Huden skal holdes ren og, så vidt mulig, tør. For meget fugt kan give hudproblemer. Vask huden med en parfumefri, hudvenlig sæbe og smør huden med en god parfumefri creme dagligt.


› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre skulderortosens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at skulderortosens pasform er forringet.

› Særlige risici

Der kan opstå trykmærker fra skulderortosen. Disse skal være forsvundet cirka tyve minutter efter ortosen er taget af. Ved vedvarende trykgener/mærker skal du kontakte din bandagist.

Hvis du har føleforstyrrelser (neuropati) i armen, er det specielt vigtigt, du er opmærksom på trykgener/mærker, og vi opfordrer dig til at undersøge armen flere gange dagligt.

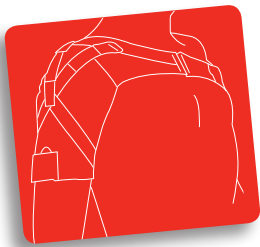

> Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

> Rengøring

Tekstiler kan vaskes i maskine ved max. 40° C eller i hånden med håndvarmt vand tilsat mild uparfumeret sæbe og tørres på et håndklæde natten over. Husk at fjerne eventuelle skinner ved vask. Må ikke vrides, stryges eller kemisk renses.

Plast og silikone kan tåle vand og sæbe, men en klud med husholdningssprit kan også bruges som rengøringsmiddel.

> Vedligeholdelse

Almindelig rengøring efter behov. Velcrolukninger skal holdes fri for fnug, derfor anbefales det at holde dem lukket, når ortosen ikke er i brug.

> Bortskaffelse/returnering

Når skulderortosen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

> Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi ta-

ger dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.
