



Brugervejledning

Softbrace korset

■ Dato for udlevering: _____

Sahva



Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye korset, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af korsettet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Korsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

- Opretholdelse af rygraden.
- Hindre udviklingen af scoliosen (krumning af rygsøjlen).
- Bevare en god siddefunktion.

› Indikation

Neuromuskulære scolioser. Knytter sig til et bredt spektrum af patologiske forhold og specielle

sygdomme. Ofte ses de progressive scolioser ved diagnoser som Spinal muskulær atrofi, Myelomeningocele (MMC) og Cerebral Parese (CP).

› Materialer

Korsettet er lavet af et blødt skumplast materiale. Der er sat stivere i korsettet i et stift thermoplastisk materiale. Bagtil sidder tre velcrostropper. Der er oftest lavet udskæring foran på korsettet for at gøre vejtrækningen lettere.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning

- Træk i undertrøjen og sørg for, der ikke er folder.
- Tag fat med begge hænder og åbn korsettet. Placer det rundt om brugeren med taljemarkeringen i taljehøjde og åbning bagpå.
- Rul først om på den ene side og før korsettet på plads på ryggen.
- Rul om på den anden side og luk korsettet.
- Stram den midterste velcrostrop ind til stregen.
- Stram derefter den nederste, og derefter den øverste, velcrostrop. Efterspænd evt. den midterste strop.
- Pas på at undertrøjen ikke rynker under korsettet, og at evt. overskydende stof trækkes ud gennem åbningen bagi korsettet.
- Kontroller at korsettet sidder lige, er på plads såvel i taljen som over hofterne, og at det er strammet rigtigt til.
- Korsettets to kanter skal være parallelle.

› Aftagning

- Rul om på siden.
- Løsn alle stropperne.
- Tag fat bag på, i åbningen, med hver hånd og åbn korsettet. Træk derefter korsettet af.



› Pleje af huden

- Tag bad hver dag - brusebad eller karbad.
- Bær altid en bomuldsstrøje, uden søm, nærmest kroppen.
- Skift undertøj ofte.
- Anvend altid trusser uden på korsettet (bleer kan af hygiejniske årsager anvendes under korsettet).
- Brug ikke pudder under korsettet.
- Ved brug af creme på kroppen, er det vigtigt, cremen er trængt helt ind i huden, før korsettet tages på.

Bemærk: Der, hvor korsettet skal trykke på kroppen, bliver huden ofte lidt mørkere og lillafarvet. Dette giver sædvanligvis ikke problemer. Misfarvningen forsvinder gradvist, når korsetbehandlingen er afsluttet.

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre korsettets pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

› Særlige risici

Der vil opstå røde mærker (trykmærker) fra korsettet. Hvis disse ikke forsvinder cirka 20 minutter efter, korsettet er taget af, skal du kontakte din bandagist. Der kan ellers, ved længere tids brug, opstå tryksår.

› Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› Rengøring

Korsettet skal vaskes med vand og en allergivenlig sæbe. Skyl grundigt for at undgå sæberester, der kan irritere huden.

› Bortskaffelse/returnering

Når korsettet ikke længere passer eller er slidt op, kan det afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om

du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

› Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

[illegible][illegible]

Gå ind på www.sahva.dk eller ring på 70 11 07 11
og få oplyst din nærmeste Sahva afdeling

Sahva