



Brugervejledning

Dropfodsorthose uden led

■ Dato for udlevering: _____

Sahva
Et liv i bevægelse



Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye dropfodsorthose, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af ortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem.

Dropfodsorthosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Ortosens funktion er at løfte foden fra underlaget, når benet svinges frem samt til en vis grad at stabilisere foden. Det vil sige, ortosen kompenserer for en muskelsvaghed i benet.

› Indikation

Neuromuskulære sygdomme der er medfødte, erhvervet senere eller opstået efter traume. Hyppigste diagnoser er hjerneblødning, blodprop i hjernen, sclerose og traume.

› Materialer

Materiale valget kan være metal, læder, skind, plast, kulfiber og silikone.

› Behandlingstid for midlertidige produkter

Efter lægens anvisninger.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Aftagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Pleje af huden

Huden skal holdes ren og - så vidt mulig - tør. For meget fugt kan give hudproblemer. Vask huden med en parfumefri, hudvenlig sæbe og smør huden med en god parfumefri lotion dagligt.

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen.

Alt sammen kan være med til at ændre ortosens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at ortosens pasform er forringet.

› Særlige risici

Der kan opstå trykmærker fra dropfodsorthosen. Disse skal være forsvundet cirka 20 minutter efter, du har taget ortosen af. Ved vedvarende trykgener skal du kontakte din bandagist. Hvis du har nedsat følelse (neuropati) i ben og fod, er det specielt vigtigt, du er opmærksom på trykgener, og vi opfordrer dig til at undersøge ben og fod flere gange dagligt.

› Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse



dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› Rengøring

Læder og skind er et naturmateriale, som er rart at have mod huden. Men det suger fugt, så du må ikke vaske skindet under vand. Brug i stedet en let fugtig klud til at tørre skindet af. Det er vigtigt, at skindet får lov at lufttørre. Der må derfor ikke bruges genstande med varme elementer som for eksempel hårtørrer, radiator mv. til at tørre ortosen.

Metal, plast, kulfiber og silikone kan tåle vand og sæbe, men en klud med husholdningssprit kan også bruges som rengøringsmiddel.

› Vedligeholdelse

Velcrolukninger skal holdes fri for fnug. Derfor anbefales det at holde dem lukket, når ortosen ikke er i brug.

› Bortskaffelse/returnering

Når dropfodsortosen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet. Elektriske aggregater i hjælpemidler skal bortskaffes på forsvarlig og miljørigtig vis, og vi anbefaler, du afleverer dem til en af Sahvas afdelinger.

Reparation/Fornyelse af produkt

› Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det pas-

ser. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.